

**kommhelp e.V.**  
Förderung kommunikativer Möglichkeiten Behinderter

# HERBI SPEAKS

## Eine kurze Anleitung

©Kommhelp e.V. 2014

**Kontakt**

kommhelp e. V.  
Horstweg 25  
D - 14059 Berlin

Telefon: +49 . (0)30 . 3260 2572  
Fax: +49 . (0)30 . 3260 2572  
Email: [info@kommhelp.de](mailto:info@kommhelp.de)  
Internet: [www.kommhelp.de](http://www.kommhelp.de)

**Vereinsregister**

Amtsgericht Berlin Charlottenburg Nr. 10183 Nz  
Gemeinnützigkeit zuerkannt: - Steuer Nr.  
670/54844  
Finanzamt für Körperschaften

**Spendenkonto**

Bank für Sozialwirtschaft Berlin  
SWIFT/BIC: BFSWDE33BER  
IBAN DE:3210020500003358400

**Inhalt:**

**Über HERBI SPEAKS (HERBI spricht) ..... 3**

**Voraussetzungen ..... 3**

**Download ..... 3**

**Installation ..... 3**

**Deinstallation ..... 3**

**Wie funktioniert's? ..... 3**

**Button hinzufügen ..... 3**

**Button editieren..... 4**

**Rahmen und Farben..... 4**

**Boards ..... 5**

## Über HERBI SPEAKS (HERBI spricht)

Mit HERBI SPEAKS lassen sich ganz einfach Kommunikationsboards erstellen, bei denen Bilder mit Texten verknüpft werden, die dann beim Anklicken vorgelesen werden.

HERBI SPEAKS läuft auf Windows-Computern.

### Voraussetzungen

Windows-Computer

Auf dem Computer muss eine künstliche Stimme installiert sein. Diese Systemstimme wird zum Sprechen der Texte verwendet.

### Download

Die Software ist kostenlos und kann bei <http://herbi.org/HerbiSpeaks/HerbiSpeaks.htm> heruntergeladen werden

### Installation

Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei HerbiSpeaksSetup.msi und bestätigen Sie die wenigen Abfragen

Auf dem Desktop wird ein Link zum Starten des Programms angelegt.



### Deinstallation

HERBI SPEAKS kann über die Systemsteuerung | Programme und Funktionen deinstalliert werden.

## Wie funktioniert's?

Nach dem ersten Start von HERBI SPEAKS sehen Sie nur eine schwarze Fläche. Das ist das erste Board und hat noch keinen Inhalt.

### Button hinzufügen

Klicken Sie mit der **rechten** Maustaste in die Fläche.

Wählen Sie aus dem Kontext-Menü **Add new button**.

Es erscheint ein rechteckiges Feld mit der Beschriftung ABC.

Klicken Sie auf den Button, so wird der Text „ABC“ gesprochen.

*Diesen Button können Sie jetzt bearbeiten (editieren).*

## Button editieren

Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste in den gerade erstellten Button.

Im Kontext-Menü sehen Sie jetzt alle Editiermöglichkeiten. Manche der Einträge sind ausgegraut, weil sie an dieser Stelle nicht zutreffen.

Das sind alle Einträge und die Übersetzung:

Add new button	Neuen Button hinzufügen
Remove button	Button entfernen
Enter Edit Mode to move or resize buttons	Wechsle zum Edit-Mode um Buttons zu verschieben oder deren Größe zu ändern.
Set button text	Text für Button festlegen
Set picture on button	Bild für Button festlegen
Remove picture from button	Bild von Button entfernen
Set audio or video on button	Audio oder Video hinzufügen
Remove audio or video from button	Audio oder Video entfernen
Show text	Text zeigen
Set button text font	Schriftart festlegen
Set button text color	Schriftfarbe festlegen
Link to board	Link zu einem anderen Board erzeugen
Go to Fullscreen view (F5).	Vollbildansicht (F5)

Im Edit-Mode wechselt der Bildschirm zu einem Kästchengitter, um das Platzieren von Buttons zu erleichtern.

Im Edit-Mode lautet der entsprechende Text im Kontext-Menü natürlich Exit Edit-Mode.

## Rahmen und Farben


Wählen Sie im Hauptmenü **Options**.

Background color: Hintergrundfarbe des Boards

Default button text colour: Standard-Schriftfarbe

Default button text font: Standard-Schriftart

Button border thickness: Rahmenstärke Buttons

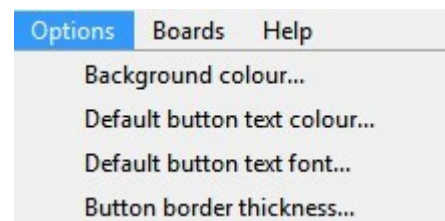

## **Boards**

Wählen Sie im Hauptmenü Boards.

- Add Board: **Neues Board erzeugen**
- Delete current board: **Löschen des aktuellen Boards.**
- Rename current board: **Namen des aktuellen Boards ändern**